

Veiste enzootilise leukoosi uuringud

ANALÜÜSIMEETODID

Antikeha uuringud	Meetod	Uurimismaterjal	Metoodika	Osakond
Veiste enzootilise leukoosi viiruse vastaste antikehade määramine vereseerumis	AGID	• seerum	5DS-TJ-1	Viroloogia-seroloogia
Veiste enzootilise leukoosi viiruse vastaste antikehade määramine vereseerumis ja piimas	ELISA	• seerum • piim	5DS-TJ-2	

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM

Tartu laboratoorium- Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Proovid

- Vereproov võetakse punase korgiga seerumkatsutisse (ilma lisandita). Proovi kogus vähemal 3 ml.
- Piimaproov võetakse puhtasse säilitusaine tabletiga anumasse. Proovi kogus vähemalt 7 ml.

Proovid võetakse võimalikult puhtalt.

Proovide pakkimine ja märgistus

- Proov pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas.
- Iga pakend märgistatakse loetavalt.

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine

Proovid saadetakse laboratooriumisse lühema võimaliku aja jooksul. Kui kohene transport ei ole võimalik, siis proove säilitatakse +4...+6 °C juures. PROOVE MITTE KÜLMUTADA!

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

- Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri, mille leiab VTL-i kodulehelt [tellimuste vormid](#) alt. Oluline on märkida kaaskirjale proovi võtmise kuupäev.

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG

AGID: kuni 5 tööpäeva

ELISA: kuni 5 tööpäeva

ANALÜÜSIMEETODID

AGID: agar-geel immuundifusiooni meetod (*agar gel immunodiffusion* / AGID/ IDR test).

ELISA: ensüüm-immuunsorbtsiooni meetod

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID

- Viroloogia-seroloogia osakond. Info telefonil 738 6106

Koostatud: Triin Tedersoo

Koostanud: 28.07.2020